


GUIDE D'INSTRUCTION

BRANCHEMENT POUR BATTERIES GROUPE 22/21 AVEC COUVERCLE

ASSEMBLAGE GROUPE 22/21

Schéma (A)

L'information de branchement des câbles aux batteries se trouve sur le schéma situé dans le couvercle y donnant accès.

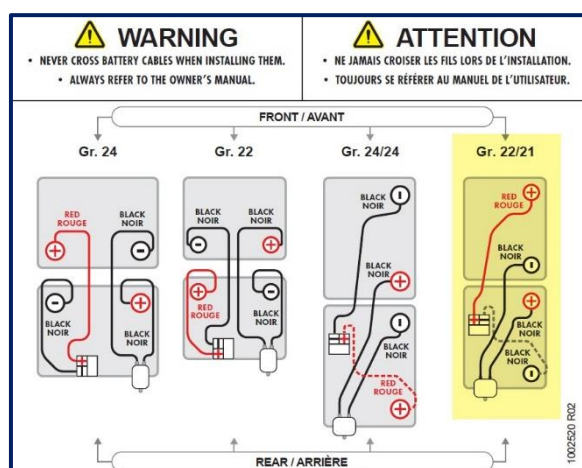

Ordre d'installation des câbles

ÉTAPE 1

Faire glisser les couvercles pour avoir accès aux bornes et pour tirer les fils tel qu'illustré sur l'image B



BRANCHEMENT POUR BATTERIES GR. 22/21 (suite)

— NOTES —

Pour le raccordement des câbles à la batterie, il est nécessaire de respecter l'ordre de la quincaillerie tel qu'illustré sur l'image ci-dessous.



S'assurer que l'embout des connecteurs sur les bornes soit dirigé vers le bas pour ne pas gêner la fermeture des couvercles tel qu'illustré sur l'image ci-dessous.



ÉTAPE 2

Raccorder les câbles du disjoncteur (1 et 2) et les câbles du connecteur (3 et 4) selon l'ordre numérique illustré sur l'image C.



ÉTAPE 3

Soulever les couvercles pour les remettre en place sur les bornes tel qu'illustré sur l'image D.



ÉTAPE 4

Acheminer la sangle parallèlement le long des batteries au-dessus des couvercles tel qu'illustré sur l'image E.

