

Déplacez-vous avec confort et style



info@continentglobe.com



OM | P25014 | 1006060 | R01



AVERTISSEMENT

Omettre de suivre les directives de sécurité pourrait causer des blessures ou la mort.

NE PAS AJUSTER, ENTRETENIR OU UTILISER CE FAUTEUIL DE TRANSPORT AVANT DE LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CE PRODUIT.

MISES EN GARDE

- ▶ **Risque de basculement** - Ce fauteuil de transport n'est pas équipé d'un dispositif anti-basculement. Il doit être utilisé uniquement sous la supervision et avec l'assistance d'un accompagnateur. Ce produit n'est pas conçu comme un fauteuil roulant manuel à propulsion autonome. L'utilisateur ne doit pas tenter de se déplacer en prenant appui sur une table, un mur, un bureau ou toute autre surface, car cela pourrait provoquer le basculement arrière du fauteuil et entraîner des blessures graves ou mortelles.
- ▶ Ce fauteuil de transport n'est pas conçu pour être utilisé comme siège dans quelconque véhicule.
- ▶ Ne pas utiliser pas ce fauteuil de transport sur les routes ou autoroutes.
- ▶ Ne pas tenter d'incliner ce fauteuil sans assistance.
- ▶ Enclencher les barrures de roues avant d'embarquer ou débarquer de ce fauteuil.
- ▶ S'assurer que le fauteuil est sur une surface nivelée avant d'embarquer ou de débarquer.
- ▶ Les appuie-pieds doivent être ajustés à un minimum de 2 1/2 pouces du sol.
- ▶ Ne pas se servir des appuie-pieds pour embarquer ou débarquer de ce fauteuil.
- ▶ Ne pas mettre de poids sur le dossier. Le fauteuil pourrait basculer.
- ▶ Ne pas utiliser les barrures de roues pour ralentir une descente ou une inclinaison.
- ▶ Un changement de direction lors d'une inclinaison pourrait rendre le fauteuil instable.

Instructions d'Utilisation

Déployer

1. Démontez les appuie-bras pour déplier le fauteuil.
2. Balancez le dossier vers le haut et sécurisez-le en place sur les supports dorsaux.
3. Attachez les appuie-pieds de chaque côté en insérant les chevilles de la structure dans les trous. Pivotez les appuie-pieds vers l'intérieur pour les sécuriser.

Replier

1. Appuyez les boutons de chaque côté du dossier et repliez-le derrière le fauteuil.
2. Tirer les sangles situées en bordure du siège l'une vers l'autre pour plier le fauteuil.
3. Pour enlever les appuie-pieds, tirez sur la poignée argentée et levez les appuie-pieds.

Pour asseoir un patient

1. Appuyez la manette de frein vers l'avant pour barrez les roues et empêchez le fauteuil de rouler.
2. Basculez les appuie-pieds vers le haut et l'extérieur ou en position verticale.

Pour ajuster les Appuie-Pieds

1. Trouvez l'outil inclus avec les appuie-pieds.
2. Tournez les roues en position de roulement.
3. À l'aide de l'outil, dévissez légèrement vers la gauche la vis hexagonale située au bas de l'appuie-pied.
4. Tirez les plaques à la longueur désirée. Les appuie-pieds doivent être à un minimum de 2\2" du sol pour obtenir le déblaiement nécessaire.
5. Resserrez la vis hexagonale avec l'outil.
6. Répétez de l'autre côté.

Entretien

Entretien de base

Essuyez toutes les composantes métalliques avec un linge doux et sec au moins une fois par semaine. Si la chaise est exposée à de la moisissure, essuyez immédiatement. L'utilisation de nettoyeurs abrasifs pourrait endommager les surfaces.

Pneus

Peu d'entretien doit être fait au niveau des pneus en caoutchouc. Passez un linge humide occasionnellement. Un pneu craquelé ou usé doit être immédiatement remplacé.

Roues Avant

Inspectez les roues avant périodiquement et lubrifiez si nécessaire. Pour lubrifier, enlevez la fourche et graissez les billes de roulement. À la réinstallation de la roue et de la fourche, serrez les écrous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espacement entre les pièces, mais que la roue tourne librement. La fourche pivotera aussi librement quand elle sera ajustée correctement. Si les écrous sont trop vissés, les roues auront de la difficulté à pivoter.

Roues

Inspectez mensuellement pour vérifier si les roues sont bien vissées. Si une roue semble lousse ou tourner croche, l'essieu devra être serré. Enlevez l'écrou de blocage, et vissez l'écrou de l'essieu. Penchez la chaise de côté pour vérifier si l'ajustement est adéquat. Réinstallez l'écrou de blocage.

Blocage des Roues

Le mécanisme de blocage des roues devrait être inspecté avant chaque utilisation. Poussez le levier complètement vers l'avant pour activer blocage des roues. Pour un ajustement parfait, au moins 1/8" devra être en contact avec le pneu. Pour ajuster, dévissez l'écrou du boulon de la structure. Glissez le sabot vers la roue arrière jusqu'à la position désirée, avec le levier en position de blocage. Serrez en position en vissant l'écrou.

Entretien

1. N'essayez pas de réparer ce fauteuil de transport vous-mêmes.
2. Appelez le détaillant où vous avez acheté ce produit. La majorité des détaillants font les réparations et commander les pièces de rechange.
3. Si votre détaillant ne peut pas vous aider, veuillez contacter Continent Globe :

info@continentglobe.com

Garantie à vie Limitée

Un an sur les pièces • Cinq ans sur les freins • Limitée à vie pour la structure

Continent Globe Corp garantit que ce produit n'a aucun défaut de matériel et de fabrication. À partir de la date d'achat, et selon la période de couverture, si ce produit est trouvé défectueux, Il sera réparé ou remplacé, selon la décision du manufacturier, Continent Globe Corp. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport encourus lors de la réparation ou du remplacement de ce produit.

Continent Globe Corp a pour devise de fournir des produits selon plus hauts standards de qualité et un service exceptionnel. Ce produit a été construit selon ces standards et inspecté avec minutie avant d'être distribué. Cette Garantie à vie Limitée représente notre confiance en la qualité de nos matériaux et de notre main d'œuvre.

Pour notre service de garantie, veuillez contacter le détaillant qui vous a vendu ce produit. En cas d'insatisfaction, veuillez communiquer directement avec nous à l'adresse ci-dessous. Veuillez avoir en votre possession le nom du produit, son numéro de série, la raison de l'appel, ainsi que les coordonnées du détaillant. Vous devrez aussi fournir une preuve d'achat. NE PAS nous retourner un produit sans en avoir eu le consentement.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes causés par une utilisation abusive de l'utilisateur. De plus, l'usage normal de pièces de caoutchouc (embouts, les poignées, etc...) ainsi que toutes autres pièces sujettes à s'abîmer avec le temps ne sont pas garanties.



Veuillez noter ces informations pour référence future:

Série _____

Date d'achat _____

Détaillant _____