

BULLETIN D'INFORMATION

RÉVISION – CG Air RÉPARATION

INTRODUCTION

Le projet pour la trousse de réparation des coussins CG Air a été révisé. En vigueur le 15 octobre, 2023, nous remplaçons l'ancienne colle et les patches par seulement l'utilisation d'une colle (aucun patch requis). La **Colle Extrême Gel Lepage** sera dorénavant employée pour faire les réparations des fuites d'air des coussins CG Air.



PRÉCISION DU CHANGEMENT

La **Colle Extrême Gel Lepage** est offerte en quincaillerie si le client souhaite se la procurer directement. Elle ne nécessite pas de patch et est très facile à utiliser. Nous allons garder un inventaire à l'interne pour accommoder les centres, tout en les informant de l'achat possible en quincaillerie. Les deux trousse offertes en inventaire sont les suivantes :

TROUSSE CONSOMMATEUR

- Trois (3) tampons d'alcool isopropylique
- Un tube de Colle Extrême Gel Lepage (20 g)*
- Code marketing pour formulaire de commande : CGAPK3
- Code de pièce pour la trousse : 1001402
- Code de pièce pour le tube seulement : 1004457



TROUSSE INSTITUTION/DÉTAILLANT

- Quinze (15) tampons d'alcool Isopropylique
- Un tube de Colle Extrême Gel Lepage (50 g)*
- Code marketing pour formulaire de commande : CGAPK15
- Code de pièce pour la trousse : 1001403
- Code de pièce pour le tube seulement : 1004458



*Colle Lepage : [Fiche de données de sécurité](#)

Révision CG Air Patch Kit**AUTRES CONSÉQUENCES****Limites connues**

Le temps de polymérisation de la colle est de 12 à 24 heures.

Disponibilité et prix

Deux troussees sont disponibles et les deux sont en inventaire en utilisant les codes précisés dans la section précédente. Le prix en quincaillerie : entre 10-15\$.

Mises à jour correspondantes

Tous les Formulaires de commande pour les coussins CG Air ont été mis à jour avec les nouvelles troussees et sont publiés sur notre site Web. Ces articles seront ajoutés au Manuel des pièces lors de sa prochaine relâche.

Un Guide d'instructions (code de pièce : 1001496) sera inclus avec toute commande de trousse de réparation. Il sera également publié sur notre site Web dans la section Support/Espace pro/Guides d'instructions.