

Guide abrégé de l'appairage Bluetooth


pour le modèle avancé de la manette R-Net et pour l'OMNI 2



Étapes pour appairer la manette ou l'OMNI 2 avec tous types d'appareils (Android, Apple ou ordinateur) :

1 - POUR ACTIVER LE MODE BLUETOOTH SUR LA MANETTE/OMNI 2 :

- Dans les paramètres, sélectionner Bluetooth. (Pour accéder les paramètres, appuyer et maintenir le bouton du haut : à gauche de l'écran pour la manette; à droite de l'écran pour l'OMNI 2)
- Mettre en marche <On> l'(les) appareil(s) à appairer. («Mouse» (souris) pour Android ou PC et « iDevice » pour produits Apple.)
- La manette ou l'OMNI 2 doivent être éteints et remis en marche.

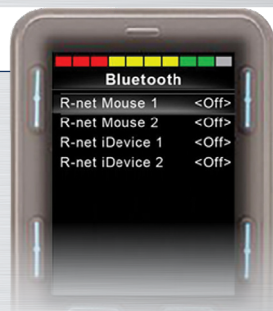

2 - POUR ACTIVER LE MODE "DISCOVERY" (DÉCOUVERTE) SUR LA MANETTE OU L'OMNI 2 :

- Sur la manette ou l'OMNI 2, appuyer le bouton < mode > pour accéder au mode Bluetooth.
- Pour la manette : Basculer vers l'avant et maintenir jusqu'au bip sonore (environ 10 secondes). Puis, basculer vers l'arrière jusqu'au bip sonore (environ 10 secondes).
- Pour l'OMNI 2 : Selon la commande spécialisée du fauteuil, actionner la même commande utilisée pour avancer et la maintenir jusqu'au bip sonore (environ 10 secondes), puis la relâcher. Ensuite, actionner la même commande utilisée pour reculer et la maintenir jusqu'au bip sonore (environ 10 secondes), puis la relâcher.
- Le symbole Bluetooth dans le haut de l'écran devrait clignoter. Le mode « Discovery » est alors activé.



3 - L'APPAREIL PEUT DÉSORMAIS ÊTRE APPAIRER À LA MANETTE OU L'OMNI 2

Pour plus d'information sur l'appairage d'un appareil avec la manette ou l'OMNI 2 ou sur l'utilisation du Bluetooth, veuillez consulter le document de Curtiss-Wright (Chapitre 6) sur notre site web à www.amylior.com

