

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Gs100

Quadriporteur



 **AMYLIOR**

Pour les instructions sur la mise en service de ce quadriporteur, le détaillant doit aller sur le site Web Amylior ou lire le code QR avec son téléphone intelligent et consulter l'onglet Assistance / Espace pro.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le distributeur/détaillant doit fournir une copie de ce manuel à l'utilisateur lors de la livraison.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel attentivement afin de vous informer sur les instructions à suivre et pour assurer votre confort et votre sécurité.

S.V.P., veuillez prendre note de la signification des symboles suivants qui se retrouvent à plusieurs endroits dans ce document. Il est très important de lire chacune des consignes associées à chacun de ces symboles.

Ne pas suivre ces consignes peut entraîner des dommages et/ou des blessures.

MISE EN GARDE



Ces consignes doivent absolument être suivies, sans quoi vous pourriez subir des blessures ou endommager votre quadriporteur.

INTERDIT !



Les manœuvres interdites doivent être évitées à tout prix. Effectuer une manœuvre interdite pourrait causer des blessures ou endommager votre quadriporteur.

IEM



Les interférences électromagnétiques (EMI) sont des «bruits» électriques causés par des moteurs électriques, des machines, des générateurs et d'autres équipements qui interfèrent avec l'intégrité des données traitées dans les ordinateurs qui se trouve à proximité ou traversant les lignes de transmission.

AVIS - Les informations précédées du mot « AVIS » viennent approfondir les explications de manœuvres, les mises en garde ou les détails du produit.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Information générale	2
2.	Indications et utilisations	2
3.	Consignes de sécurité	2-3
4.	Interférences électromagnétiques (IEM)	4-5-6-7
5.	Pièces du Gs100	8
6.	Spécifications techniques	9
7.	Panneau de contrôle	10-11
8.	Ajustement du siège	12
9.	Frein électromagnétique	13
10.	Réassignation	13
11.	Votre quadriporteur	14
12.	Désassemblage de votre quadriporteur	14-15
13.	Assemblage de votre quadriporteur	16
14.	Entretien de votre quadriporteur	17-18
15.	Diagnostic de dépannage	19-20
16.	Garantie limitée	21
	Notre mission	22
	Nos valeur	22
	Pour nous contacter	22

1. INFORMATION GÉNÉRALE

Ce manuel d'utilisateur fait partie des éléments inclus avec le quadriporteur Gs100. Celui-ci doit être conservé par l'utilisateur et doit accompagner le produit en tout temps, même après une revente. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications par rapport aux informations fournies dans ce manuel d'utilisateur suite à des développements techniques.

Ce document ne peut pas être réimprimé, copié ou traduit, même partiellement, sans une autorisation écrite du fabricant. Veuillez prendre note que les modifications apportées à ce manuel d'utilisateur ne seront pas communiquées. Veuillez contacter le fabricant afin de vous informer des nouveaux développements.

2. INDICATIONS ET UTILISATIONS

Le quadriporteur Gs100 détaillé dans ce manuel a été conçu pour des personnes à mobilité réduite. La limite de poids ne doit pas excéder **135 kg (300 lb)**.



AVANT DE COMMENCER À UTILISER VOTRE QUADRIPORTEUR

- Vous devez avoir reçu l'information de votre détaillant pour vous expliquer les consignes d'utilisation et les consignes de sécurité.
- Avant d'embarquer sur le quadriporteur, le contact doit être éteint et le frein du moteur doit être engagé.
- S'assurer que le siège est en position vers l'avant et relever l'appui-bras pour vous asseoir.
- Ajuster le guidon pour votre confort.
- Soyez prudent lorsque vous débarquez de votre quadriporteur.
- Ne pas excéder le poids de **135 kg (300 lb)** sur votre quadriporteur, ceci inclut les objets que vous apportez avec vous.
- Ne pas utiliser votre téléphone cellulaire durant l'utilisation de votre quadriporteur.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

S'il y a de l'information dans ce manuel que vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser votre quadriporteur, veuillez contacter votre détaillant ou votre intervenant. À défaut de suivre les instructions de ce manuel, des blessures pourraient en résulter ou vous pourriez endommager votre quadriporteur. Amylior se dégage de toutes responsabilités de blessures ou dommages suite à une utilisation inappropriée.



MISE EN GARDE : LIRE et SUIVRE toutes les instructions, les avertissements

et les notes contenus dans ce manuel avant d'utiliser votre quadriporteur Gs100.

- Un détaillant autorisé des produits **Amylior** doit faire la livraison de ce quadriporteur en suivant toutes les procédures contenues dans ce manuel.
- **NE JAMAIS** transporter de passager.
- **TOUJOURS** s'assurer d'éteindre le quadriporteur et d'engager le frein-moteur avant de l'assembler ou de le désassembler.
- **NE PAS** tourner à des vitesses élevées.
- **TOUJOURS** s'assurer de garder le poids au centre du quadriporteur pour éviter de basculer.
- **NE PAS** reculer sur un terrain en pente ou accidenté. Toujours approcher les obstacles ou les pentes de front.
- **NE PAS** utiliser le quadriporteur dans un escalier fixe ou mobile. Utiliser un ascenseur ou une rampe conçus à cet effet ayant une déclinaison maximum de 6°.
- **TOUJOURS** réduire la vitesse en descendant une pente.
- **TOUJOURS** s'assurer que le siège est orienté vers l'avant et bien fixé au quadriporteur avant de l'utiliser.
- **NE PAS** monter sur des pentes ou des obstacles qui ne respectent pas la capacité sécuritaire du quadriporteur.
- **PRUDENCE!** Il y a un risque de coincer les doigts lors de l'assemblage ou du désassemblage.
- **NE JAMAIS** rester assis sur le quadriporteur lorsqu'il est transporté dans un véhicule ou dans un transport adapté.
- **TOUJOURS** sécuriser le quadriporteur au plancher avec des attaches conformes lors du transport.
- **TOUJOURS** faire l'inspection du quadriporteur avant chaque utilisation (p.2). Si un problème est décelé, **NE PAS** l'utiliser avant de contacter le détaillant.
- **TOUJOURS** respecter les règles routières et piétonnières ainsi que tous les règlements en vigueur dans votre région lorsque vous utilisez le quadriporteur.
- **NE PAS** conduire sur la route. Comme les piétons, utiliser une intersection pour traverser la rue.
- **NE PAS** utiliser votre quadriporteur sur une surface glacée ou glissante.
- **NE PAS** conduire votre quadriporteur sous l'influence d'alcool, de drogue ou de médicaments.
- **NE PAS** essayer de monter une marche ou une bordure de trottoir avec votre quadriporteur.
- **SOYEZ PRUDENT!** Les surfaces telles que le gazon, le gravier ou les balcons n'ayant pas de rampe sont à éviter.

4. IEM (INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES)

 **MISE EN GARDE** - Lire toutes les mises en garde afin de réduire le risque de déclenchement des freins ou de mobilisation du quadriporteur par inadvertance :

1. Méfiez-vous du danger causé par les émetteurs-récepteurs portables. Ne jamais allumer ou utiliser un émetteur-récepteur portatif lorsque l'alimentation de votre quadriporteur est en marche. Tentez d'éviter qu'un tel appareil ne fonctionne près de votre quadriporteur et soyez très prudent si vous croyez vous trouver à proximité d'un tel appareil en marche.
2. Évitez de circuler près d'une station de télévision ou de radio avec votre quadriporteur.
3. Si un mouvement involontaire se produit, assurez-vous d'immobiliser votre quadriporteur dès qu'il est sécuritaire de le faire.

MISE EN GARDE

A. QU'EST-CE QUE L'INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (IEM)?

1. L'interférence électromagnétique provient de sources d'ondes radio telles que les émetteurs radio et les émetteurs récepteurs. (Un « émetteur-récepteur » est un dispositif qui envoie et reçoit des signaux d'ondes radio).
2. Différentes sources d'interférence électromagnétique intenses sont présentes dans votre environnement quotidien. Certaines sources d'interférence sont évidentes et faciles à éviter, tandis que d'autres sont mieux dissimulées et il est possible que vous n'arriviez pas à toutes les contourner.
3. Les sources d'émission susceptibles de nuire au bon fonctionnement de votre quadriporteur sont les stations de radio, station de télévision, les émetteurs de radio amateur, les radios bidirectionnelles et les téléphones cellulaires.
4. L'interférence électromagnétique peut également être émise par un fil électrique ou causée par une décharge électrique.

MISE EN GARDE

B. QUEL EFFET L'IEM PEUT-ELLE AVOIR?

1. L'interférence électromagnétique (EM) peut :
 - Désengager les freins de votre quadriporteur
 - Mobiliser le quadriporteur
 - Changer la trajectoire du quadriporteur

L'éventualité de telles situations pourrait vous causer des blessures ou en occasionner aux autres.

2. L'interférence électromagnétique peut endommager le système de commandes de votre quadriporteur. Ce qui peut vous mettre en danger ou occasionner de coûteuses réparations.

MISE EN GARDE

C. LES SOURCES D'INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (IEM)

Il y a 3 principaux types de sources d'interférence électromagnétiques :

1. **Transcepteurs portatifs** : l'antenne est habituellement montée à même l'appareil. Ce type comprend :
 - Radios de type bande du citoyen (CB),
 - « Walkie-talkies »,
 - Radio de sécurité, de service d'incendie et de police,
 - Téléphones cellulaires,
 - Ordinateurs portables avec téléphone ou fax,
 - Autres dispositifs de communication personnelle

C. LES SOURCES D'INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (IEM) (SUITE)

2. **Émetteurs-récepteurs mobiles à moyenne portée** : ces radios bidirectionnelles sont, entre autres, utilisées dans les voitures de police, les camions de pompiers, les ambulances et les taxis. L'antenne est généralement montée à l'extérieur du véhicule.

AVIS - Ces appareils peuvent transmettre des signaux lorsqu'ils sont allumés, même s'ils ne sont pas utilisés.

3. **Émetteurs-récepteurs à longue portée** : tels que les antennes de radiodiffusion de radios commerciales et télévisées et les radios amateurs (HAM).

AVIS - Les appareils suivants n'émettent habituellement pas d'interférence électromagnétique :

- Ordinateurs portables (sans téléphone ou fax),
- Téléphones sans fil,
- Téléviseurs ou radios AM / FM,
- Lecteurs CD ou cassette.

MISE EN GARDE

D. DISTANCE ENTRE VOTRE QUADRIPORTEUR ET LA SOURCE D'INTERFÉRENCE

L'intensité de l'énergie électromagnétique augmente rapidement lorsqu'on s'approche de sa source d'émission. C'est pourquoi l'IEM en provenance de dispositifs portatifs est particulièrement préoccupante (consulter le point C.1 (transcepteur portatif) de la section précédente pour plus d'information). Une personne utilisant un de ces appareils peut apporter des niveaux élevés d'énergie électromagnétique très près de votre quadriporteur sans que vous le sachiez.

MISE EN GARDE

E. NIVEAU D'IMMUNITÉ

1. Le niveau d'électromagnétisme (EM) est mesuré en volts par mètre (V / m). Chaque quadriporteur peut résister jusqu'à un certain niveau d'IEM. C'est ce qu'on appelle le « niveau d'immunité ».
2. Plus le niveau d'immunité du quadriporteur est élevé, moins le risque d'IEM est important. Nous croyons qu'un niveau d'immunité de 20 V / m est suffisant pour protéger l'utilisateur du quadriporteur des sources les plus communes d'ondes radio. Ce produit respecte ce niveau d'immunité.

AVIS - Toute modification ou ajout de pièces à votre quadriporteur peut diminuer le niveau d'immunité et augmenter le risque d'IEM. Nous ignorons le niveau de résistance à l'interférence électromagnétique des pièces qui n'ont pas été testées et des dispositifs en provenance d'autres fournisseurs.

MISE EN GARDE

F. SIGNALER TOUT DOUTE DE PERTURBATION PAR IEM

Il est important de rapidement signaler toute activité étrange ou non sollicitée (ex.: mouvement involontaire du quadriporteur ou relâchement des freins). Veuillez prendre en note toutes les sources d'onde radio pouvant avoir été à proximité du quadriporteur au moment de l'incident afin de nous communiquer l'information.

Département du service à la clientèle Amylior : +1 450 424-0288

MISE EN GARDE

G. IEM EN PROVENANCE DU QUADRIPORTEUR

Le champ électromagnétique émis par les composantes électroniques de ce quadriporteur peut interférer avec d'autres dispositifs électroniques émettant un champ similaire, tels que les systèmes d'alarme des centres commerciaux.


5. PIÈCES DU Gs100

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Panier rabattable | 7 - Boîtier de batteries |
| 2 - Rétroviseur | 8 - Tapis anti-dérapant |
| 3 - Panneau de contrôle | 9 - Barrure du guidon |
| 4 - Appui-bras escamotable ajustable | 10 - Barrure d'ajustement du guidon |
| 5 - Dossier rabattable | 11 - Guidon ajustable |
| 6 - Levier de freins | |



6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Quadriporteur Gs100	
SPÉCIFICATIONS	
Capacité de poids	135 kg (300 lb)
Vitesse maximale	6.5 km/h (4.5 mph)
Autonomie	Jusqu'à 20 km (12 miles)
Garde au sol du plancher	56 mm (2,2 po)
Garde au sol du moteur	43 mm (1,7 po)
Rayon de giration	990 mm (39 po)
Types de batteries	22 Ah
Couleurs	Bleu mat ou cabernet
Chargeur	Hors bord 3 A
Contrôleur	45 A
DIMENSIONS	
Longueur	1080 mm (42,5 po)
Largeur	546 mm (21,5 po)
Hauteur totale	840 mm (33 po)
Hauteur au siège avec dossier abaissé	600 mm - 650 mm (23.5 po - 25.5 po)
Hauteur du sol au plancher	115 mm (4,5 po)
Hauteur plancher-siège	430 mm (17 po)
Distance entre axe avant et axe arrière	815 mm (32 po)
POIDS DES COMPOSANTES (assemblé)	
Plancher avant	20 kg (44 lb)
Train d'entraînement	12.7 kg (28 lb)
Siège avec appui-bras	10 kg (22 lb)
Batteries	9.5 kg/Boîtier (21 lb)
PNEUS	
Avant	205 mm (8 po)
Arrière	205 mm (8 po)
Anti-basculants	50 mm (2 po)
SIÈGE STANDARD	
Hauteur du dossier	355 mm (14 po)

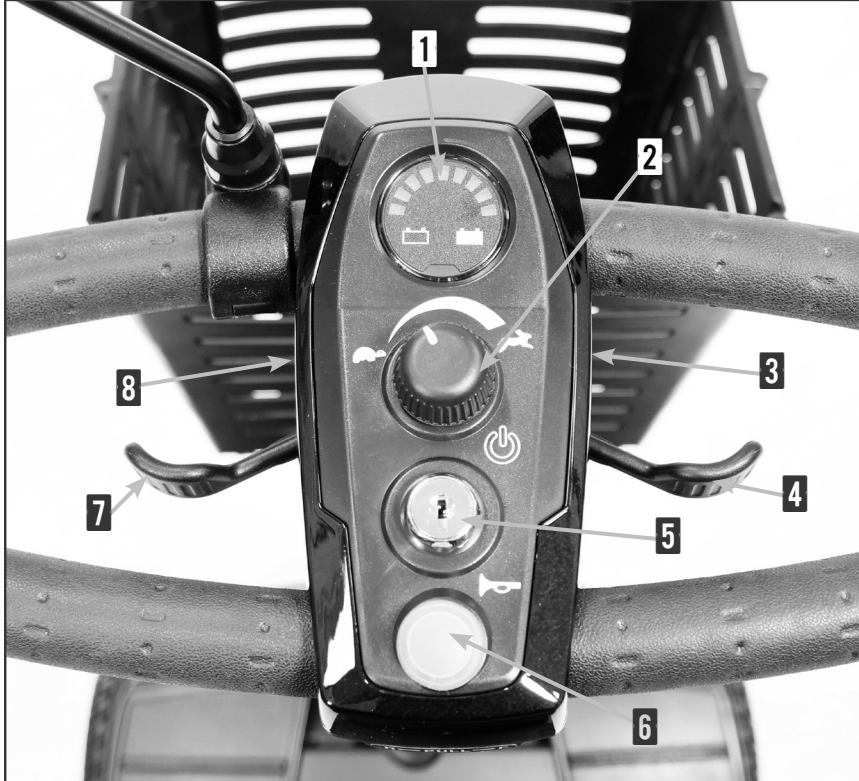


7. PANNEAU DE CONTRÔLE


- 1 - Indicateur de charge
- 2 - Contrôle de vitesse
- 3- Prise USB
- 4 - Levier de vitesse et de direction « Avant »
- 5 - Interrupteur à clé Marche/Arrêt
- 6 - Klaxon
- 7 - Levier de vitesse et de direction « Arrière »
- 8 - Prise du chargeur



Indicateur de charge	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicateur de charge vous aide à évaluer la charge des batteries de votre quadriporteur. • Vert = pleine charge, • Jaune = 50 % de charge, • Rouge = moins de 50 % de charge.
Contrôle de vitesse	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la vitesse de votre quadriporteur en tournant le bouton (<i>de la vitesse minimale à la vitesse maximale</i>). • Il est recommandé de sélectionner un réglage de vitesse avec lequel vous êtes à l'aise, sûr et en contrôle (<i>en fonction de votre situation et de vos conditions actuelles</i>). • Tortue = vitesse minimale / Lapin = vitesse maximale
Klaxon	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer le klaxon : Presser le bouton.
Leviers de direction Avant/Arrière	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'avancer ou de reculer, assurez-vous d'abord d'être bien assis sur le quadriporteur. • Pour avancer : tirer sur le levier de contrôle de vitesse droit "Avant" avec la main droite OU pousser le levier gauche vers l'avant avec le pouce gauche. • Pour reculer : tirer sur le levier de contrôle de vitesse gauche "Arrière" avec la main gauche OU pousser le levier droit vers l'avant avec le pouce droit. • Votre revendeur peut inverser les commandes en fonction de vos besoins.
Interrupteur à clé Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • La clé est nécessaire pour faire fonctionner votre quadriporteur. • Assurez-vous de garder le double dans un endroit sécuritaire. • Pour mettre en marche l'appareil : tourner la clé vers la droite (l'indicateur de charge s'allumera). • Pour éteindre l'appareil : tourner la clé vers la gauche.
Prise du chargeur	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible de le faire avec la prise sous le panneau de contrôle ou directement sur le boîtier des batteries.
Prise USB	<ul style="list-style-type: none"> • La prise USB peut être utiliser pour charger des appareils avec un câble à connexion USB.

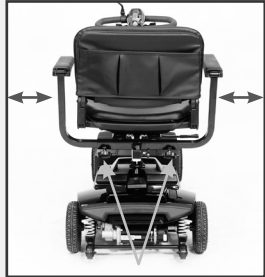
8. AJUSTEMENT DU SIÈGE

<p>1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour ajuster la largeur des appui-bras, tourner la poignée de gauche et de droite pour élargir ou diminuer la largeur. • Il est important de bien resserrer les poignées après l'ajustement. 	
<p>2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour ajuster l'angle des appui-bras, tourner la vis située en dessous de chaque appui-bras pour obtenir l'angle désiré. • Pour monter l'angle de l'appui-bras, tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. • Pour baisser l'angle, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. 	
<p>3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le siège peut pivoter à 360° et être verrouillé à différentes positions (espacement à tous les 45°). • Pour le régler, appuyer sur le levier situé sous le siège et tourner le siège dans la position souhaitée. Relâcher le levier pour verrouiller le siège dans la position désirée. Tourner d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il soit barré. 	

9. ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Votre quadriporteur est muni d'un frein électromagnétique à l'arrière.

1. Pour utiliser votre quadriporteur, le levier doit être engagé en position « **drive (D)** ».
2. Pour déplacer votre quadriporteur sans utiliser la batterie (mode manuel), désengager le levier à la position neutre « **N** ».
3. Lorsque le quadriporteur est en position « **N** », poussez-le lentement. Pousser trop rapidement engagera un mécanisme de ralentissement et rendra difficile la poussée.

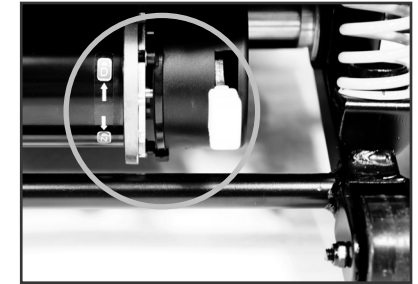

MISE EN GARDE

- Ne pas s'asseoir sur votre quadriporteur si le levier de frein de votre quadriporteur est à la position « **N** ».
- Toujours s'assurer que le levier de frein est à la position « **D** » avant d'insérer la clé pour se déplacer avec votre quadriporteur.
- Ne jamais désengager le levier de frein durant la conduite.

10. RÉASSIGNATION

Si vous vendez ou donnez votre quadriporteur à un nouvel utilisateur, veuillez lui remettre également tous les documents techniques requis afin d'assurer une utilisation en toute sécurité.

Le quadriporteur **Gs100** doit être vérifié, nettoyé et remis en parfait état de marche par un technicien certifié ou qualifié avant l'échange.

11. VOTRE QUADRIPORTEUR

Votre quadriporteur a été conçu pour se désassembler en 5 morceaux, ce qui le rend plus facile à transporter. Pour votre sécurité, veuillez suivre les étapes suivantes :





- | | |
|--|--------------------------|
| 1 - Panier rabattable | 4 - Châssis avant |
| 2 - Siège | 5 - Train d'entraînement |
| 3 - Boîtier de batteries transportable | |

12. DÉSAMBLAGE DE VOTRE QUADRIPORTEUR

1.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'être sur une surface plane.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Barrer le guidon.

3.	<ul style="list-style-type: none"> Enlever la clé du contact. 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> Enlever le siège en le prenant fermement de chaque côté et en le levant vers le haut. 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> Soulever le boîtier de batterie. 	
6.	<ul style="list-style-type: none"> Enlever le panier du guidon. 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> Rabaisser le guidon en dévissant la poignée de serrage. Enfoncer et tourner le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre à 90° pour verrouiller la roue avant, ce qui facilite le transport. 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> Desserrer la poignée d'ajustement du guidon et rabatter le guidon à plat. Serrer la poignée pour fixer le guidon en position abaissée. Une fois abaissée et verrouillée, il peut être utilisé comme poignée pour faciliter le transport. 	
9.	<ul style="list-style-type: none"> Séparer la partie du train d'entraînement (arrière) du châssis (avant). Avec une main, soulever la manette à dégagement rapide. Avec l'autre main, soulever le châssis vers le haut et retirer-le pour séparer les deux parties. 	

13. ASSEMBLAGE DE VOTRE QUADRIPORTEUR

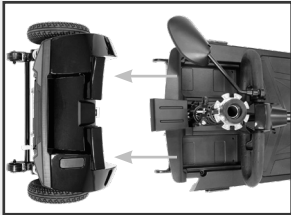1.	<ul style="list-style-type: none"> • Réinstaller le train d'entraînement avec le châssis. • Enligner le train d'entraînement avec le châssis avant. 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Réinstaller le boîtier de batterie. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Relever le guidon. 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Installer le panier. 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Installer le siège en angle pour voir le réceptacle du siège. 	
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Insérer le poteau du siège dans le réceptacle. 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Pousser sur la barre de déclenchement en pivotant vers la gauche ou la droite pour s'assurer que le siège est bien fixé. • Faire attention aux points de pincement possible! 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Débarrer le guidon. 	

14. ENTRETIEN DE VOTRE QUADRIPORTEUR

NETTOYAGE

PNEUS

- Pour nettoyer les pneus, utiliser un savon doux sur un linge humide.
- Ne pas utiliser de solvant, ceci pourrait endommager ou réduire la durabilité du pneu.

CARROSSERIE

- Utiliser un savon doux ou un détergent sur un linge mouillé pour enlever la saleté et l'huile. Essuyer et polir à l'aide d'un linge sec, doux et propre.
- Ne pas utiliser de boyau ou de nettoyeur haute pression pour laver votre quadriporteur.

SIÈGE EN CUIRETTE ET TAPIS

- Nettoyer avec un savon doux ou un détergent doux et un linge humide (un nettoyeur pour vinyle peut également être utilisé).
- Essuyer avec un linge doux et sec.

BATTERIES

L'entretien de vos batteries est primordial pour le bon fonctionnement de votre quadriporteur.

- Après chaque journée d'utilisation, avec l'aide de votre chargeur, recharger les batteries pendant 6 à 8 heures. Pour de meilleurs résultats, chargez vos batteries pendant la nuit.
- La charge de vos batteries peut baisser si le quadriporteur est inactif pendant une longue période. Si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant plus d'une semaine, chargez complètement les batteries, puis retirez-les de leur boîtier.

IMPORTANT : Les nouvelles batteries doivent être complètement chargées avant l'utilisation. Charger les batteries pendant une période de 12 heures pour une performance optimale.

POUR MAXIMISER LA VIE DES BATTERIES

Suivre les consignes suivantes pour maximiser la vie des batteries :

- Utiliser seulement le chargeur fourni avec le quadriporteur.
- Ne pas utiliser de chargeur pour auto ou tout autre chargeur.
- Ne pas décharger complètement les batteries.
- Ne pas laisser les batteries déchargées pendant des périodes prolongées.
- Recharger les batteries déchargées dès que possible.
- Recharger les batteries au maximum régulièrement.
- Recharger au maximum avant le storage.
- Vérifier les batteries en storage une fois par mois.

BATTERIES (SUITE)

POUR CHARGER LES BATTERIES :

- Votre quadriporteur est muni d'un chargeur hors-bord.
- Pour recharger les batteries, insérer le connecteur dans la prise qui se trouve dans le boîtier de batterie ou dans le panneau de contrôle.
- Lorsque les batteries sont complètement chargées, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation du chargeur de la prise murale et de la prise de charge.
- **AVERTISSEMENT :** Des gaz explosifs peuvent être générés lors du chargement des batteries. Tenir le Gs100 et son chargeur à l'écart de flamme ou de source d'étincelles. Assurer une ventilation adéquate lors du chargement des batteries.

REMARQUE: *Votre quadriporteur ne bougera pas tant que le chargeur restera connecté.*

ENTRETIEN DE LA BATTERIE :

⚠ MISE EN GARDE

- Votre quadriporteur fonctionne uniquement avec des batteries à décharge profonde scellées au plomb-acide SLA ou AGM. L'utilisation de tout autre type de batteries peut provoquer une surcharge électrique ou une étincelle pouvant produire une explosion et/ou un incendie causant des blessures graves ou la mort.
- Ces batteries ne nécessitent aucun entretien.
- Il n'y a aucun risque de déversement ou de fuite.
- Ces batteries peuvent être transportées, en toute sécurité, dans les avions, les bus et les trains.

REMPLACEMENT DES BATTERIES :

Un détaillant autorisé des produits Amylior doit faire le remplacement des batteries pour prévenir tout risque de blessure.

DISJONCTEUR

Le disjoncteur principal se déclenche dans des situations où il y a une forte consommation de courant. En cas de panne, assurez-vous que le disjoncteur est en fonction. Le bouton de réinitialisation du disjoncteur se trouve sur la batterie.

Si vous n'arrivez pas à corriger le problème en appuyant sur le bouton de réinitialisation, contactez votre détaillant autorisé **Amylior**.

Si le disjoncteur principal continue de se déclencher, il se peut qu'il y ait un problème électrique à résoudre.

N'ESSAYEZ PAS de faire les réparations électriques vous-même.

15. DIAGNOSTIQUE DE DÉPANNAGE

Le microprocesseur de votre quadriporteur est muni d'un système de tonalités qui vous informe en cas de problème. Le diagnostic est en fonction du nombre de tonalité indiqué dans le tableau suivant. Si possible, consultez l'information ci-dessous avant de communiquer avec votre détaillant autorisé Amylior. Veuillez avoir à la main, le numéro de série de votre quadriporteur qui est situé sous le tapis.

1 TONALITÉ	2 TONALITÉS
<ul style="list-style-type: none"> • Indique que la charge de vos batteries est basse. • Votre quadriporteur continuera à fonctionner à vitesse réduite. • Pour remédier à la situation, recharger vos batteries. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indique que la charge de vos batteries est très basse. • Votre quadriporteur va cesser d'opérer sous peu. • Pour remédier à la situation, recharger vos batteries. • Si le problème persiste, il se pourrait que l'une ou les deux batteries soient défectueuses. • Il peut aussi y avoir un problème avec votre chargeur. • Si le problème persiste, contactez votre détaillant autorisé Amylior.
3 TONALITÉS	4 TONALITÉS
<ul style="list-style-type: none"> • Indique qu'il faut contacter votre détaillant autorisé Amylior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indique que le contrôleur du moteur surchauffe ou est utilisé à trop haute capacité pendant une trop grande période de temps. • Cette situation peut se produire si l'utilisateur du quadriporteur dépasse la limite permise de 135kg (300 lb) ou si le quadriporteur est utilisé dans une pente de plus de 6° pendant une trop longue période. • Le quadriporteur pourra repartir uniquement lorsque le contrôleur du moteur aura atteint sa température opérationnelle. • Pour remédier à la situation, laissez refroidir votre quadriporteur pendant au moins 10 minutes.

15. DIAGNOSTIQUE DE DÉPANNAGE (SUITE)

5 TONALITÉS	6 TONALITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Indique qu'il y a un problème avec le frein. Le levier de frein est peut-être dans la mauvaise position ("N" neutre). Le frein ou le câblage du frein est peut-être endommagé. Pour votre sécurité, le quadriporteur cessera de fonctionner jusqu'à ce que le problème soit résolu. Pour remédier à la situation, assurez-vous que le levier de frein est en position «D» engagée. Tournez l'interrupteur à clé sur la position «OFF» pour arrêter le code sonore, engagez le levier de frein, puis rallumez à l'aide de la clé. Si le problème persiste, contactez votre détaillant autorisé Amylior. 	<ul style="list-style-type: none"> Indique que le levier de contrôle de direction n'est pas à la position neutre «N» quand la clé est mise en position de marche «ON». Si le levier de contrôle de direction n'est pas bien réglé, un ajustement peut être nécessaire. Pour remédier à la situation, mettre la clé à la position «OFF», s'assurez que le levier de contrôle de direction est en position neutre «N» et recommencer. Si le problème persiste, contactez votre détaillant autorisé Amylior.
7 TONALITÉS	8 TONALITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Indique qu'il y a un problème avec le levier de contrôle de direction ou le potentiomètre. S'assurer que le levier de contrôle de direction n'est pas en position engagé vers l'avant ou vers l'arrière. Votre quadriporteur ne fonctionnera pas jusqu'à ce que le problème soit résolu. Pour remédier à la situation, assurez-vous que toutes les connexions électriques sont correctement branchées. Si le problème persiste, contactez votre détaillant autorisé Amylior. 	<ul style="list-style-type: none"> Indique qu'il y a un problème de voltage du moteur. Votre quadriporteur ne fonctionnera pas jusqu'à ce que le problème soit résolu. Veillez contacter votre détaillant autorisé Amylior.
	9 TONALITÉS
	<ul style="list-style-type: none"> Indique qu'il y a un autre problème interne. Pour votre sécurité, votre quadriporteur cessera de fonctionner Veillez contacter votre détaillant autorisé Amylior.

16. GARANTIE LIMITÉ

Amylior garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication en considérant que l'utilisateur en fait une utilisation normale et non-abusive. Voir la couverture qui suit pour les différents composants à partir de la date d'achat.

- 5 ANS** – Châssis principal, mât du siège, structure du guidon et fourche.
- 2 ANS** – Ensemble moteur/transmission, frein électromagnétique, contrôleur, chargeur, câbles électroniques et autres composants électroniques.
- 1 AN** – Batteries d'origine et barre de son Bluetooth.
- EXCLUSIONS** – À moins d'un défaut manufacturier, toutes pièces assujetties à l'usure normale et qui doivent être remplacées à l'occasion telles que les pièces de plastiques, brosses de moteur, sabots de freins, fusibles et ampoules, pneus et chambres à air, siège et rembourage.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut est le résultat d'un accident, d'une négligence, d'un usage abusif ou d'un transport inapproprié du produit. Si ce produit est trouvé défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé ou réparé par **Amylior** (selon la décision du manufacturier). Cette garantie ne couvre pas les frais de transport encourus lors du remplacement ou de la réparation de ce produit.

Amylior s'engage à fournir des produits selon les plus hauts standards de qualité. Ce produit a été construit selon ces standards et a été inspecté avec minutie avant d'être livré. Cette garantie limitée représente notre confiance en la qualité de nos matériaux et de notre main d'oeuvre. Pour votre service de garantie, veuillez contacter le détaillant qui vous a vendu ce produit.

En cas d'insatisfaction, veuillez communiquer directement avec nous. Veuillez avoir à la main le nom du produit, le numéro de série, la raison de l'appel, ainsi que les coordonnées du détaillant. Vous devez aussi fournir une preuve d'achat.

NE PAS nous retourner un produit sans avoir eu préalablement notre consentement. Cette garantie ne couvre pas les problèmes causés par une utilisation abusive de l'utilisateur.

NOTRE MISSION

Notre mission est d'améliorer la mobilité et la qualité de vie de nos clients en développant des produits supérieurs et en offrant un service exceptionnel, adaptés aux besoins particuliers des utilisateurs.

NOS VALEURS

- **L'humanité** est le cœur de notre compagnie.
Nous éprouvons un profond respect et une grande compassion pour les êtres humains à l'intérieur et à l'extérieur de notre organisation. Nous avons foi envers les autres et nous nous engageons à les aider.
- **L'intégrité** est la fondation de notre entreprise.
Nous sommes fiers de collaborer ouvertement avec honnêteté, éthique et transparence dans nos interactions quotidiennes avec nos clients, collègues et partenaires. Nous respectons l'équité en matière d'emploi où chacun donne le meilleur de soi-même.
- **L'innovation** est la raison d'être de notre vision.
Tous les jours, nous progressons, découvrons, améliorons et travaillons avec énergie pour changer le statu quo en encourageant les employés à explorer de nouvelles idées qui font la différence.
- **L'excellence** est la cible dans nos réalisations.
Étant l'influence principale dans l'atteinte de nos objectifs, l'excellence souligne d'avantage notre leadership et notre grande détermination à livrer la meilleure solution pour chacun de nos clients.
- **La passion** est la source de notre créativité.
Nous partageons une motivation et un engagement qui stimule, éveille et inspire les autres. Nous visons tous le même but afin d'offrir la meilleure expérience-client, tout en ayant du plaisir à le faire.

POUR NOUS CONTACTER :

info@amylor.com

www.amylor.com



3190 F.-X.-Tessier

Vaudreuil-Dorion (Québec)

J7V 5V5, Canada

+1 450 424-0288